


### Ögonspolningsflaska - KLOIRN -

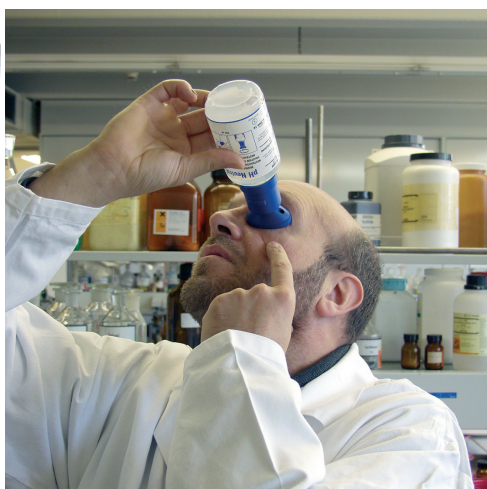

#### ► Produktbeskrivning

- pH-neutral ögonspolningsvätska används för att skölja ögonen rena efter att dessa kontaminerats av stänk från sura och basiska ämnen.
- Flaskan installeras i närheten av den potentiella faran. Dess kompakta format gör att den lätt får plats i din sjukvårdslåda eller verktygsväska.
- Den pH-neutrala vätskan verkar mycket snabbare än vanligt kranvatten eller klassiska, sterila lösningar. Den neutraliserar på mycket kort tid pH-värdet från 1 till 14. Efter att ögats normala pH-värde har återställts fortsätter ögonspolningen med en koksaltlösning eller vanligt kranvatten i åtminstone 15 minuter i väntan på läkarvård.

#### ► Teknisk beskrivning

- **Innehåll:** 200 ml
- **Typ av vätska:** 4,9% steril fosfatlösning
- **Ungefärlig spolningstid:** 2 minuter

Flaskorna säljs hermetiskt förslutna. De öppnas genom rotation av sköljmunstycket. En öppnad flaska kan inte sparas utan måste bytas ut efter bruk.

#### ► OBS!

Vätskestrålen bör vara svag och konstant. Tillämpa ett lätt tryck på flaskan utan att klämma för hårt.

*Detta datablad utarbetades 12.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.*

*All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.*

*Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.*

*Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.*